

BORT Plastilină terapeutică standard



Instrucțiuni de utilizare

REF 951 500/951 600

BORT. Benefit at your side.



Nu este adecvat pentru copii cu vârsta sub 3 ani |



Necomestibil | Conținut de bor > 0,1 %

D951500|2020-02|001 RO

Vă mulțumim pentru încrederea acordată unui dispozitiv medical produs de BORT GmbH. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime aceste instrucțiuni de utilizare. În cazul în care aveți întrebări, adresați-vă medicului dumneavoastră sau comerciantului de la care ați achiziționat dispozitivul medical.

Destinația de utilizare

Acest produs medical este o plastilină terapeutică fără latex care ajută la îmbunătățirea mișcării și a funcționării circuitului de control neuromuscular prin intermediul unor exerciții speciale pentru degete și mână.

Indicații

Restabilirea capacității de mișcare a mâinii.

Contraindicații

Afecțiuni ale pielii la nivelul podului palmei.

Riscuri asociate utilizării/indicații importante

Acest dispozitiv medical este un produs disponibil pe bază de prescripție. Discutați despre modul de utilizare și durata utilizării cu medicul dumneavoastră curant. Personalul specializat de la care ați primit dispozitivul medical va selecta stabilitatea adecvată a acestuia și vă va oferi instruire cu privire la modul de utilizare.

- utilizați dispozitivul medical conform indicațiilor
- utilizarea simultană a altor produse este permisă numai după consultarea cu medicul dumneavoastră
- nu modificați produsul
- nu utilizați în cazul plăgilor deschise la nivelul podului palmei
- nu utilizați produsul în cazul intoleranței la unul dintre materialele componente
- produs nereutilizabil – acest dispozitiv medical auxiliar este destinat tratamentului unui singur pacient
- atenție, produsul nu este destinat consumului
- dacă plastilina intră în contact cu ochii, spălați zona afectată cu apă și consultați un medic, dacă este cazul
- produsul nu este adecvat pentru copii mai mici de 3 ani
- nu aplicați pe haine sau alte materiale textile (covoare)
- în cazul în care manifestați înroșire, dureri sau umflături, întrerupeți exercițiul și consultați imediat un medic, dacă este necesar

Instrucțiuni de utilizare

Exercițiile terapeutice sunt prezentate în instrucțiunile de antrenament incluse în pachetul de livrare. Stabilitatea necesară a plastilinei depinde de gradul de putere și este stabilită de medicul sau fizioterapeutul dumneavoastră.

Depozitare

Depozitați plastilina terapeutică în ambalajul inclus în pachetul de livrare, la temperatura camerei, pentru a evita murdărirea acesteia.

Compoziție

Polimer de silicon, acid boric, Ulei mineral, silicat, Glicerină, pigmenti

Indicații privind curățarea

Plastilina terapeutică nu poate fi curățată. Să vă spălați bine mâinile înainte de utilizarea acesteia.

Garanție

Se aplică prevederile legale din țara în care a fost achiziționat produsul. Pentru eventuale pretenții de garanție, vă rugăm să vă adresați comerciantului de la care ați achiziționat produsul. Vă rugăm să curățați produsul înainte formulării unei pretenții de garanție. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate afecta condițiile de acordare a garanției sau poate duce la anularea acesteia. Garanția este exclusă în cazul utilizării produsului în mod contrar indicațiilor, dacă nu sunt luate în considerare riscurile asociate utilizării, în cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare, precum și în cazul modificărilor neautorizate la nivelul produsului.

Durata de utilizare/durata de viață a produsului

Durata de viață a produsului este determinată de uzura naturală în cazul utilizării acestuia în mod corespunzător și conform recomandărilor.

Obligația de notificare

Aveți obligația de a notifica distribuitorului specializat de la care a fost achiziționat produsul sau producătorului, precum și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale orice eveniment care duce la agravarea semnificativă a stării dumneavoastră de sănătate în timpul utilizării acestui dispozitiv medical.

Datele noastre de contact sunt menționate în prezentele instrucțiuni de utilizare. Pentru datele de contact ale autorității desemnate din țara dumneavoastră, vă rugăm să accesați următorul link: www.bort.com/md-eu-contact.

Eliminare ca deșeu

La finalul duratei de viață, produsul trebuie eliminat ca deșeu conform reglementărilor locale aplicabile.

Declarației de conformitate

Confirmăm faptul că acest produs corespunde cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI. Pentru varianta actuală a declarației de conformitate, accesați următorul link: www.bort.com/conformity

Versiunea: 11.2019

Dispozitiv medical |  Un singur pacient – utilizare multiplă

