

Art. 100560 | Orteza de gleznă Bort MalleoXpress

Imobilizarea este un principiu de bază în tratamentul leziunilor și a suprasolicitării deoarece recuperarea va fi mai rapidă iar sechelele prevenite. Ortezele de gleznă protejează structurile lezate (articulații, ligamente, capsule și cartilaje) și permit simultan mobilizarea funcțională a țesuturilor indemne (fără leziuni).

Orteza de gleznă Bort MalleoXpress permite stabilizarea efectivă a articulației gleznei și mobilizarea în concordanță cu etapa din programul de recuperare.

Indicații:

Postchirurgical, posttraumatic, în tratamentul conservator al entorselor (gradul II-III), leziunile (rupturile de ligamente), imobilizarea în afecțiuni inflamatorii, imobilizarea postoperatorie după sutura / reconstrucția ligamentară, instabilitățile cronice ale articulațiilor gleznei superioare și inferioare, instabilitățile acute și cronice capsulo-ligamentare.

Contraindicații:

Boală arterială periferică ocluzivă, tulburări ale drenajului limfatic, inflamații diverse / edem al țesutului moale distal față de orteză, tulburări regionale ale sensibilității sau ale circulației sangvine, afecțiuni cutanate în zona de aplicare a ortezei.

Instrucțiuni de aplicare-ajustare:

Informații:

Pentru a obține un maximum de stabilitate, o taloneta plantară poate fi atașată de orteză utilizând sistemul Velcro.

1. Deschideți benzile de fixare circulare și deschideți (banda) sistemul Boa prin tracțiune în exterior (până când se aude click!). Sistemul Boa de închidere este acum în poziția „deschis” iar sistemul de tensionare este liber. În plus, puteți deschide larg / detașa banda din regiunea metatarsienelor.
2. Astfel, în orteza larg deschisă introduceți piciorul. Închideți banda din jurul metatarsienelor (deasupra degetelor). Articulația gleznei trebuie menținută la un unghi de 90 grade. Se închid cele două benzi circulare superioare (de la nivelul gambei), întâi cea din spate și apoi cea din față. Ulterior treceți banda Boa spre interiorul gleznei și o atașați de zona de prindere.
3. Apasați pe sistemul Boa (până când se aude click!). Acum sistemul este închis și puteți roti butonul în sensul acelor de ceasornic pentru tensionarea benzii și obținerea stabilizării gleznei. Atenție, în cazul în care tracționați de aceasta bandă prea puternic pot apărea tulburări ale circulației sangvine locale și/sau zone de edem, roșeață etc.
4. Pentru scoaterea ortezei, deschideți sistemul Boa - prin tracțiune în exterior a butonului (până când se aude click!) și detașați sistemul de tensionare (tip vinci). Detașați apoi celelalte benzi și scoateți orteza.

Dependent de severitatea leziunii medicul Dvs. poate opta pentru o stabilizare suplimentară. Astfel orteza poate fi echipată cu un modul suplimentar, o talonetă plantară, care se atașează pe captușeala interioară (plantară) a ortezei cu ajutorul sistemului Velcro.

Ajustarea ortezei pe parcursul terapiei

Orteza de gleznă Bort MalleoXpress poate fi adaptată pe tot parcursul programului de recuperare. În acest sens, taloneta plantară și atelele laterale pot fi introduse sau scoase.

Medicul Dvs. va decide nivelul de imobilizare necesar pentru stadiul leziunii Dvs.

Compoziție

84% poliamidă, 16% spandex

Instrucțiuni importante:

Acest dispozitiv este pentru utilizare individuală (nu este transmisibil).

În situația în care există recomandare pentru utilizarea ortezei pe timpul nopții, evitați întreruperea circulației sanguine; dacă apar tulburări de sensibilitate, detensionați sau scoateți complet orteza. Dacă problemele persistă, contactați medicul care a făcut recomandarea.