

REBOUND[®] ACHILLESSEHNEN-KEILE

Optimierte Behandlung von Achillessehnen-Rupturen

Der Rebound[®] Air Walker immobilisiert, schützt und stabilisiert nach Verletzungen am Sprunggelenk und Fuß. Die neuen Keile werden eingesetzt, um die Rehabilitation nach funktionellen (nicht-operativen) und post-operativen Behandlungen von Achillessehnen-Rupturen weiter zu verbessern. Durch den veränderbaren Winkel kann das Maß der Plantarflexion während des Rehabilitationsprozesses einfach angepasst werden. Das geringe Gewicht und das anatomische Design erhöhen den Patientenkomfort. Mit Hilfe der patentierten universellen Wölbung bleibt die Ferse innerhalb des Walkers richtig positioniert.

INDIKATIONEN:

- Komplette oder partielle Achillessehnen-Rupturen
Unterstützung der funktionellen Rehabilitation:
 - Bei nicht-operativer Behandlung
 - Nach operativer Behandlung
- Für Patienten mit Achillessehnen-Problemen, die eine Immobilisierung der Plantarflexion des Fußes erforderlich machen.



REBOUND® ACHILLESSEHNEN-KEILE

Optimierte Behandlung von Achillessehnen-Rupturen

Die Achillessehne ist aufgrund ihrer eingeschränkten Blutzufuhr und der Belastungen, denen sie ausgesetzt ist, sehr verletzungsanfällig. Aktuelle Protokolle empfehlen eine Immobilisierung und eine schrittweise Reduktion der Plantarflexion bei der Behandlung von Achillessehnen-Rupturen.



PROTOKOLL ZUR BEHANDLUNG VON ACHILLESSEHNEN-RUPTUREN

Empfohlenes Protokoll* für die **nicht-operative** und **post-operative** Rehabilitation für Patienten mit einer Ruptur in der Mitte der Achillessehne:

Woche 0	Woche 2	Woche 4	Woche 6	Woche 7	Woche 8
Keine Gewichtsbelastung, zirkulärer Unterschenkel-Cast mit Fußstellung in einem Winkel von ungefähr 30 Grad	Rebound Air Walker mit 3 Fersenkeilen	Rebound Air Walker mit 2 Fersenkeilen	Rebound Air Walker mit 1 Fersenkeil	Rebound Air Walker	Schuhe mit Absatzerhöhung, Physiotherapie
					

Der Walker soll Tag und Nacht getragen werden.

*Akute Achillessehnen-Ruptur, Evaluierung von Behandlung und Komplikationen, Katarina Nilsson, Helander, 2009.

BESTELL-INFORMATIONEN

REBOUND® AIR WALKER				REBOUND® ACHILLESSEHNEN-KEILE		
Schuhgröße	Größe	Normale Polsterung	Dünne Polsterung	Größe	Beschreibung	Artikel-Nr.
33-35,5	XS	B-242900001E	B-242900001SE	S	Für Rebound Air Walker XS/S	AWK0001
36-39	S	B-242900002E	B-242900002SE			
39,5-44	M	B-242900003E	B-242900003SE	M	Für Rebound Air Walker M	AWK0005
44,5-46,5	L	B-242900004E	B-242900004SE	L	Für Rebound Air Walker L/XL	AWK0009
47-50	XL	B-242900005E	B-242900005SE			



WWW.OSSUR.DE
WWW.OSSUR.CH

ÖSSUR DEUTSCHLAND GMBH
Augustinusstraße 11A
50226 Frechen
Deutschland
ÖSSUR SCHWEIZ AG
Hans Huber-Strasse 38
4500 Solothurn
Schweiz

TEL 02234 6039 102 (DE) | 0800 3440 00 (CH)
00800 3539 3668 (AT) | 0800 838 437 (FR)
FAX 02234 6039 101 (DE) | 0800 3440 01 (CH)
00800 3539 3299 (AT)
info-deutschland@ossur.com
info-schweiz@ossur.com

